



使用前に取扱説明書を必ずお読みください

《 禁 忌 》

- 救急治療や手術を必要としている方
- 感染症部位、口内炎への直接の接触

《 注 意 事 項 》

※ 口腔内の刺激により肢体の筋肉も緩みますので、急に立ち上がったたりしないでください。


※ 交換時期は、使用頻度にもよりますが、7～14日程を目安にしてください。

- 製品の使用により不具合を感じた場合は直ちに使用を中止し、担当の医師または医療従事者にご相談ください。
- 1回の使用で汚れ等が付着する場合があります、本来の性能が発揮できない可能性が考えられます。使用後は、流水でよく洗浄を行ってください。
- 1回の使用時間は1分～5分程度を目安としてください。
- シリコンの製品部分がやぶれてしまう事がありますので、取り出しの際は注意してください。万が一、穴が開いてしまった場合は使用しないでください。
- 水濡れ、直射日光、化学物質との接触は避けて保管してください。
- 使用期限は外箱に記載しています。使用期限をお守りください。
- **分包販売の禁止（施術使用でない1本バラ売りの禁止）**



●分包販売（製品を開封してのバラ売り販売）は、薬機法違反となります。

●一般医療機器製品は、必ず製品未開封の状態と同梱の添付文書と併せて販売することが義務付けられております。

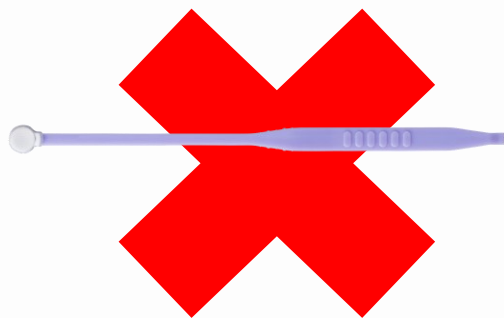

* スティックのみの1本販売は不可



* 施術としてご利用



* 箱単位での販売

* 施術後1本お持ち帰りを推奨。

* 製品販売のみ行う場合は、必ず製品規格状態での販売をお願い致します。